




## Luupusantikoagulantide algoritm

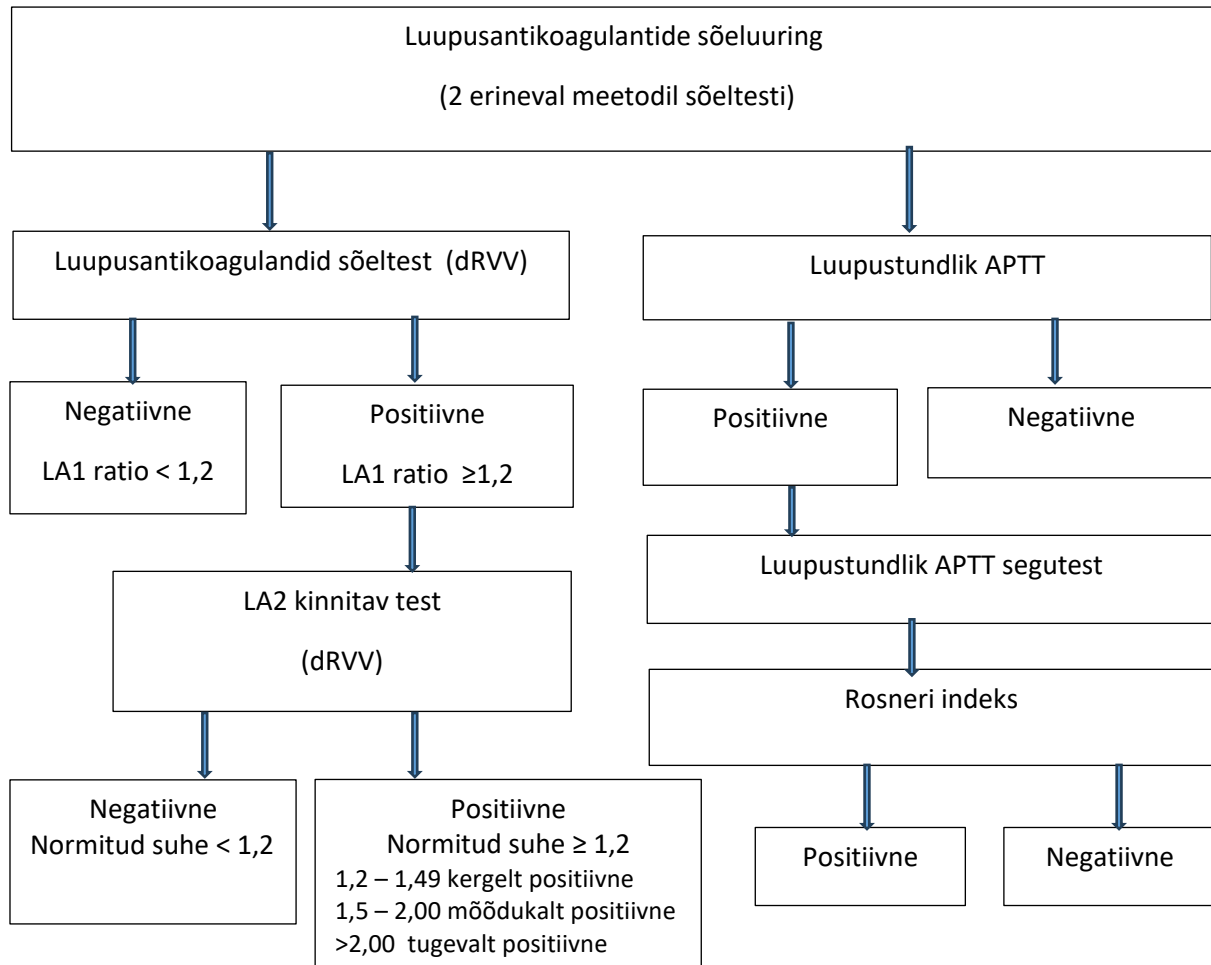

### Tõlgendus

1. Kui mõlemad sõeltestid on negatiivsed, siis on tulemus luupusantikoagulantide leiu osas negatiivne. Kinnitavaid teste ei teha.
2. Kui vähemalt üks sõeltest on positiivne, siis tehakse kinnitavad testid.
  - 2.1. Kui luupusantikoagulantide sõeltest (dRVV) on positiivne, siis tehakse LA2 kinnitav test (dRVV) ja arvutatakse normitud suhe. Kui normitud suhe on  $\geq 1,2$ , siis on tulemus luupusantikoagulantide leiu osas positiivne.
  - 2.2. Kui luupustundlik APTT on positiivne, siis tehakse segutest patsiendi plasma ja normaalplasmaga ning arvutatakse Rosneri indeks. Kui Rosneri indeks on positiivne, siis on tulemus luupusantikoagulantide leiu osas positiivne.

### Piirangud:

LA uuringute väärtused on ebausaldusväärsed ägeda tromboosi korral, ägeda põletikulise reaktsiooni ja antikoagulantravi foonil. Vitamiin K-antagonistide manustamisest peab olema möödas 1-2 nädalat või on INR  $< 1,5$ , DOAC manustamisest peab olema möödas vähemalt 2 päeva. LMWH manustamisest peab olema möödas 12 tundi.